

TOEPASSING VAN LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE BIJ ZWANGERSCHAP EN KRAAMBED:

Indicaties	Toepassing	Bestralingstijd SOLARDO eco 150	Frequentie
Pijnlijke tepel	Oppervlakkig – ideaal enkele minuten voor het aanleggen	2 – 2,5 Min.	Acuut: voor elke voeding, daarna: 2–3x per dag
Mastitis	Puntueel – volledige ontstekingshaard, punten op 1–2 cm afstand	1 – 1,5 Min./Punt	Meerdere keren per dag
Keizersnede Episiotomie Aambeien Koortslip / genitale herpes	Oppervlakkig – volledig gebied	20 – 30 Sec./cm ²	1–2x per dag
Acupunctuur	Puntueel – direct op het acupunctuurpunt	0,5 – 1 Min./Punt	Afhankelijk van indicatie

V02 / 11.2021

ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Voer de lasertherapie uit totdat de klachten zijn verdwenen!
Bij oppervlakkige bestraling: afstand van 1–2 cm aanhouden.
Bij puntgerichte bestraling: direct op de huid plaatsen.



 ardo
SWITZERLAND

Let op de gebruiksaanwijzing bij het apparaat.

TOEPASSING VAN LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE BIJ BABY'S EN PEUTERS:

Indicaties	Toepassing	Bestralingstijd SOLARDO eco 150	Frequentie
Luieruitslag	Oppervlakkig – volledig gebied	3 Sec./cm ²	Meerdere keren per dag
Navelgenezing / granuloom	Oppervlakkig – volledig gebied	3 Sec./cm ²	1–2x per dag
Schaafwonden Kneuzingen Verstuikingen	Oppervlakkig – volledig gebied	7 Sec./cm ²	1–2x per dag
Brandwonden	EERST KOELEN! Daarna oppervlakkig behandelen	7 Sec./cm ²	1–2x per dag

ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voer de lasertherapie uit totdat de klachten zijn verdwenen!

Bij oppervlakkige bestraling: afstand van 1–2 cm aanhouden.

Bij puntgerichte bestraling: direct op de huid plaatsen.

